

We, View-M
will always be there for you.

뷰엠 헬스케어

셀프시력검사기

VAA-2000





“

VAA-2000 셀프 시력 검사기로
간편한 시력검사를


”

셀프 시력 검사기


VAA-2000은 사용자가 접안렌즈에 가까이 가면, 검사가 자동으로 시작되어 검안자 없이 스스로 시력을 검사 할 수 있는 장비입니다

셀프시력 검사기 간단 사용 방법

VAA-2000에 이마를 대면 자동으로 검사를 시작합니다

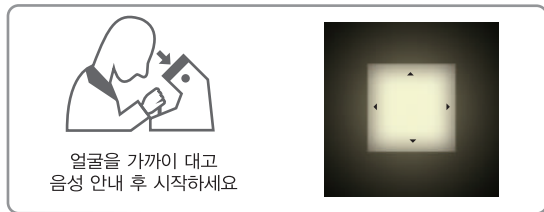

VAA-2000의 손잡이를 원의 열린 방향으로 미세요

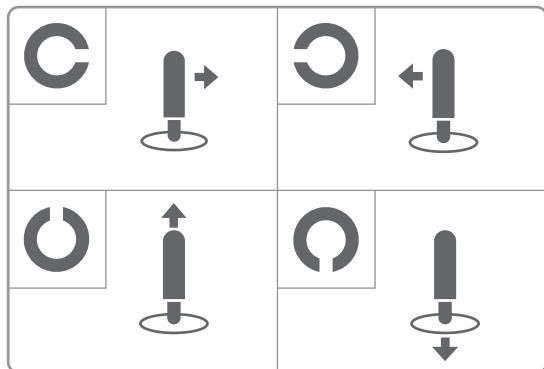


모르겠으면 적색버튼을 누르세요



조작이 쉽고 빠른검사 (30초 이내)

쉬운 작동

사용자는 접안경을 통하여 시표를 보며 손잡이를 움직이고 시표가 흐릿하거나 방향을 구분 할 수 없으면 적색버튼을 누르세요. 이 검사기를 처음 사용하는 사람일지라도 음성안내를 받아 쉽게 검사를 마칠 수 있습니다.

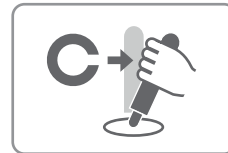

사용자 편의 기능

다국어 음성지원

한국어, 영어, 옵션(다국어 지원)



오토커팅

검사가 완료되었을 때 열전사 프린터를 통하여 자동으로 시력 검사거리와 시력값이 출력되고 용지는 자동절단 되어 나옵니다





어린이와 노인도 간단한 동작만으로 사용 할 수 있어 검사시간이 빠르고 편리합니다
셀프 시력 검사기로 더욱 편리한 생활을 할 수 있습니다

다양한 기능

저시력 알림기능

사용자가 시력을 검사한 결과 값에 따라 저시력 알림기능을 지원합니다

광고 효과 기능

원하는 프로모션 문구를 시력 검사 결과가 표시된 용지에 표기하여 광고효과를 볼 수 있습니다(옵션)



감열지 절약 모드 기능

감열지에 출력되는 글자를 부분적으로 제한 할 수 있는 기능을 제공하여 감열지를 절약할 수 있습니다

시력결과 데이터 전송(옵션)

RS 232C 시리얼 포트를 통한 연동 지원

VAA-2000은 다른 기기와 연결하여 데이터를 쉽고 편리하게 전송할 수 있습니다(옵션)




다양한 검사 프로그램

검사모드 선택

원거리(5M) 또는 근거리(50CM)시력측정모드 SINGLE(단안검사), BOTH(단안/양안검사), QUICK(빠른단안검사), OTHERS(OEM) 모드

후면의 설정판은 설정상태를 녹색 LED로 표시하여 현재 운용되는 상태를 확인하는데 편리합니다

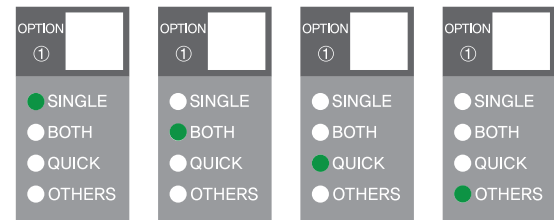


단위설정 선택

VAA-2000은 3종류의 시력 단위 선택이 가능합니다

A type:Decimal(0,1)

B type:feet(200)

C type:Meter(60)

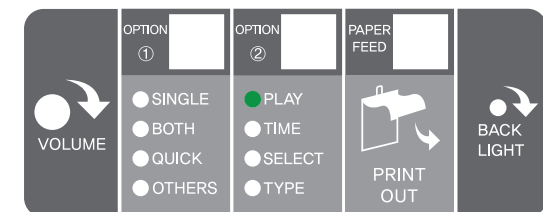

공간제한 없는 VAA-2000

어디서나 설치 가능한 BODY

크고 무거운 다른 시력 검사장치와는 달리 상대적으로 가볍고 이동이 용이하고 크기가 작아 공간제한 없이 언제 어디서나 간편하게 설치하고 검사가 가능합니다



VAA-2000 SPECIFICATION

품명	셀프시력검사기
측정거리	5m 또는 50cm 원거리 및 근거리 검사
시표	란돌트 고리
전원	DC +12V 5.0A (전원 어댑터)
규격	209(가로)x321(세로)x363(높이)mm
측정범위 A 단위	0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0
측정범위 B 단위	200, 100, 66.7, 50, 40, 33.3, 28.6, 25, 22.2, 20, 16.7, 13.3, 10
측정범위 C 단위	60, 30, 20, 15, 12, 10, 8.6, 7.5, 6.7, 6, 5, 4, 3
제어장치	조이스틱과 버튼
프린터	감열식 프린터
거리 모드 선택	다이얼 노브
후면 패널	블륨 : 부저음, 안내음성 옵션1 버튼 : 단안, 양안, 퀵검사, 그외 옵션2 버튼 : 작동, 시간, 설정, 단위 페이퍼 피드 버튼 : 프린트 용지 출력 외부장치연결 : 시리얼포트(RS232C) 전원스위치, 전원단자
소프트웨어	윈도우CE, Application
악세서리	사용설명서, 파워 어댑터, 파워코드, 먼지덮개

제품의 사양 및 디자인은 예고없이 변경될 수 있습니다.